

Solutions d'assurance Dynacare^{MD}

115 Midair Court, Brampton (Ontario) L6T 5M3

REMARQUE : Les échantillons recueillis sont utilisés uniquement à des fins d'assurance, et NE doivent PAS être utilisés pour établir un diagnostic médical.

ÉTAPES		INSTRUCTIONS POUR LA TROUSSE DE SANG/URINE			
REPLISSAGE DU FORMULAIRE D'AUTORISATION DE LABORATOIRE	<p>Le candidat assuré doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lire et signer la section « Avis et consentement et chaîne de responsabilité » • Signer le sceau de sécurité (ruban d'inviolabilité) qui se trouve au bas du formulaire 	<p>L'examineur/facilitateur doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplir toutes les sections du formulaire en écrivant en LETTRES MAJUSCULES • Signer la section « Avis et consentement et chaîne de responsabilité » • Apposer ses initiales sur le sceau de sécurité (ruban d'inviolabilité) qui se trouve au bas du formulaire • Écrire le nom et le prénom du candidat proposé sur les étiquettes à code à barres qui se trouvent sur les tubes et sur l'étiquette de laboratoire • S'assurer que le nom du candidat assuré est le même partout et qu'il correspond à celui apparaissant sur les échantillons du demandeur • S'assurer d'inscrire le code de laboratoire de la compagnie d'assurance 			
PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS D'URINE	<p>Flacon de prélèvement et couvercle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirer le couvercle jaune du flacon de prélèvement • Aviser le candidat assuré de fournir un échantillon d'urine directement dans le flacon de prélèvement (50mL ou plus) • Mesurer la température de l'urine et consigner le résultat sur le formulaire d'autorisation de laboratoire • Visser le couvercle jaune sur le flacon de prélèvement d'urine pour préparer le remplissage du tube jaune/rouge • Après avoir rempli le tube, enlever le couvercle jaune et dévisser la petite aiguille verte • Jeter l'aiguille verte contaminée dans un contenant pour objets piquants et tranchants 	<p>Remplissage et/ou transfert de l'urine dans les tubes de prélèvement identifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décoller l'étiquette à code à barres pré-identifiée qui se trouve au bas du formulaire d'autorisation de laboratoire et l'apposer sur le tube de prélèvement d'urine (URC-121G) • Les tubes se trouvent dans la partie gauche de la trousse et sont placés en ordre de prélèvement – un tube de conservation pour analyse d'urine à bouchon jaune/rouge (1U) (à remplir en premier) et deux tubes d'aliquote d'urine à bouchon jaune • Soulever l'étiquette du couvercle jaune du flacon de prélèvement pour exposer le dispositif de transfert intégré • Mettre le tube de conservation pour analyse d'urine à bouchon jaune/rouge (1U) dans l'orifice se trouvant sur le dessus du couvercle jaune puisque le volume de remplissage minimal du tube est de 7mL et que le contenu doit immédiatement être mélangé après le remplissage en effectuant 10 inversions complètes du tube • Mettre les tubes à bouchon jaune restants, un par un et le bouchon vers le bas, dans l'orifice se trouvant sur le dessus du couvercle jaune. Pousser le tube sur le point de perforation pour percer le bouchon. Maintenir le tube en place jusqu'à ce qu'il soit rempli (remplissage contrôlé par le vide) • Comme solution de rechange (s'il n'y a pas de vide ou si le débit est faible), l'urine peut être transférée par transvasement • Apposer le ruban inviolable pré-signé sur le tube d'aliquote d'urine URC-121G jaune clair. • Mettre le tube d'urine à bouchon jaune/rouge dans la fente 1U de l'emballage double coque et mettre ensuite les deux tubes à bouchon jaune dans l'emballage double coque indiqué par l'aliquote d'urine 			
PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS SANGUINS	<ul style="list-style-type: none"> • Les tubes se trouvent dans la partie droite de la trousse et sont placés dans l'ordre approprié de prélèvement • Effectuer une ponction veineuse selon la description apparaissant dans le diagramme fourni • Ne pas mélanger le contenu des différents tubes BD vacutainer /VACUETTE^{MD} (rouge/noir, lavande, gris) • Décoller les étiquettes à code à barres pré-identifiées qui se trouvent sur le formulaire d'autorisation de laboratoire et les apposer sur les tubes de prélèvement BD/VACUETTE^{MD} (trois) ainsi que sur le tube d'aliquote de sérum à bouchon blanc (un) • Remettre les tubes dans l'emballage double coque dans l'ordre où ils étaient initialement placés 	<p>Couleur du tube</p> <p>Rouge/noir (SST)</p>	<p>Ordre de prélèvement</p> <p>1^{er} (fente 1B de l'emballage double coque)</p>	<p>Mélange par inversion</p> <p>5 fois</p>	<p>Directives supplémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est nécessaire de mélanger pour faire intervenir l'activateur de coagulation • Après avoir mélangé, laisser coaguler en position verticale pendant 30 minutes dans la fente qui se trouve dans l'emballage double coque. Ne pas placer en position horizontale • Recommandation : Dans un délai maximal de 2-4 heures suivant le prélèvement, centrifuger le tube rouge/noir SST à 3 000 rpm (1 200 g [FCR]) pendant 10 minutes (rotor à godets oscillants) ou 15 minutes (rotor à angle fixe) • Transférer le sérum en le transvasant dans le tube d'aliquote de sérum à bouchon blanc pré-identifié (fente 4B de l'emballage double coque)
		<p>Lavande (K₂EDTA)</p>	<p>2^e (fente 2B de l'emballage double coque)</p>	<p>8 à 10 fois</p>	<p>Aucune</p>
		<p>Gris (fluorure de Na/oxalate de K)</p>	<p>3^e (fente 3B de l'emballage double coque)</p>	<p>5 à 10 fois</p>	<p>Aucune</p>
ÉLIMINATION DES DÉCHETS					
<ul style="list-style-type: none"> • Les fournitures utilisées, telles que les objets piquants (aiguilles), les gants, le flacon de prélèvement, le porte-aiguille, la gaze, etc., ne doivent pas être renvoyées au laboratoire. • NE PAS mettre d'objets piquants ou tranchants à l'intérieur de la trousse d'échantillons ou à l'intérieur du sac ou du contenant d'expédition. NE PAS expédier de déchets piquants et tranchants au laboratoire. • Éliminer les objets piquants et tranchants dans un contenant pour déchets biomédicaux piquants et tranchants conformément aux règlements environnementaux en vigueur dans votre région. • Expédier les déchets biomédicaux piquants et tranchants au site de cueillette des objets piquants et tranchants de votre région conformément aux règlements en matière de transport. • Il est à noter que le non-respect de ces règlements place les personnes manipulant les colis dans une situation dangereuse et peut être signalé aux organismes de réglementation. 					
PRÉPARATION DE LA TROUSSE POUR L'EXPÉDITION (ÉVITER LA CHALEUR ET LE FROID EXTRÊME) :					
<ul style="list-style-type: none"> • Garder tous les échantillons au frais immédiatement après le prélèvement, éviter les températures extrêmes. • S'assurer que les tubes et tous les bouchons sont bien fermés et que du papier absorbant a été inséré dans l'emballage double coque en fonction de sa taille (sang/urine : deux feuilles; urine : une seule feuille); fermer le couvercle et apposer une étiquette à code à barres sur la surface externe de l'emballage double coque dans l'espace désigné sous la section « Code à barres ici ». • Mettre l'exemplaire du « Formulaire d'autorisation de laboratoire » destiné au laboratoire dans la pochette extérieure du <u>sac de retour d'échantillons</u> en plastique. • Mettre l'emballage double coque dans la pochette en plastique du <u>sac de retour d'échantillons</u>, retirer la bandelette pour exposer l'adhésif et sceller la pochette, puis l'insérer dans l'enveloppe PuroPak de Purolator. <ul style="list-style-type: none"> • Fixer et sceller le bordereau d'expédition sur l'enveloppe PuroPak de Purolator. Conserver la trousse préparée au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C) jusqu'au ramassage du colis. • REMARQUE : <u>Un</u> bordereau d'expédition est requis par enveloppe PuroPak de Purolator; ne pas coller ou attacher plusieurs enveloppes ensemble. • Expédier les trousses remplies au plus tard un jour après le prélèvement (ou le plus tôt possible). • Au Canada : Utiliser toujours le service d'expédition Purolator (888.744.7123) pour expédier les trousses remplies à Solutions d'assurance Dynacare. Pour tous les autres pays, utiliser les services d'expédition qui conviennent. 					