

RECUEIL DE SPÉCIMENS AVEC ORASURE™^{MD}

Recueil du spécimen

Marche à suivre recommandée par le fabricant

Préposé aux risques :

1. Remettre le tampon de recueil de spécimens et le flacon OraSure™ à la personne à assurer.
2. Lui expliquer toute la procédure.

Personne à assurer :

4. Retirer le tampon de l'emballage en plastique transparent.
5. Placer le tampon entre votre joue et votre gencive inférieure. Frotter doucement le tampon d'avant en arrière plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit humide.
6. Tenir le tampon fermement en place entre la joue et la gencive pendant deux minutes (maximum cinq minutes), en gardant la bouche fermée.

IMPORTANT

Ne pas retirer le tampon de votre bouche avant que les deux minutes se soient écoulées.

- Retirer le bouchon du flacon et le mettre de côté.
- Insérer le tampon dans le flacon jusqu'à ce qu'il atteigne le liquide bleu.
- Plier le bâton contre le flacon jusqu'à ce que la partie du haut se casse. Jeter la partie du haut et laisser le tampon dans le flacon.
- Remettre le bouchon en place en le poussant fermement sur le flacon.

Préposé aux risques :

1. Inscrire le nom de famille et le prénom de la personne à assurer sur le flacon de fluide oral ainsi que la date du recueil à l'aide des étiquettes code à barres qui se trouvent au bas du formulaire d'autorisation du laboratoire.
2. Faire signer et dater la bague d'inviolabilité par la personne à assurer. Le préposé aux risques doit également signer la bague.
3. Coller la bague d'inviolabilité sur le dessus du flacon de fluide oral.



Séparer l'emballage du tampon suffisamment pour permettre d'enlever aisément le tampon



Demander au sujet de placer le tampon entre sa joue et sa gencive inférieure et de frotter d'avant en arrière jusqu'à ce que le tampon soit humide.



Dire au sujet de laisser le tampon en place pendant deux minutes (maximum 5 minutes) pendant que vous chronométrez.



Ouvrir le flacon, qui doit être à la verticale, et remettre le flacon ouvert au sujet.



Demander au sujet d'insérer le tampon dans le liquide bleu se trouvant au fond du flacon.



Dire au sujet de casser le manche du tampon en l'appuyant sur le côté du flacon.



Remettre le bouchon en l'enclenchant.

POUR REMPLIR LE FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE

Préposé aux risques :

1. Écrire clairement en capitales.
2. Le nom de la personne à assurer doit être le même que celui qui se trouve sur la demande d'assurance.
3. Demander à la personne à assurer de lire la section AVIS ET CONSENTEMENT/CHAÎNE DE POSSESSION du recto et du verso du formulaire.
4. Faire signer et dater la section AVIS ET CONSENTEMENT/CHAÎNE DE POSSESSION par la personne à assurer et le préposé aux risques.
5. Distribuer les exemplaires du formulaire d'autorisation du laboratoire comme suit :
 - Le premier exemplaire doit être envoyé au laboratoire avec le spécimen recueilli.
 - Le deuxième est remis à la personne à assurer.
 - Le troisième est l'exemplaire du préposé aux risques.

PRÉPARATION DE LA TROUSSE

Préposé aux risques :

- Placer le flacon de fluide oral (s'assurer que le bouchon est bien en place) dans un sac à fermeture par pression et glissière contenant une feuille absorbante.
- Placer le premier exemplaire du formulaire d'autorisation du laboratoire et le sac à fermeture par pression et glissière contenant le flacon et la feuille absorbante dans la boîte d'expédition de spécimens.
- Placer la boîte d'expédition dans l'enveloppe PuroPak™ de PuroLator™ fournie. Enlever le rabat de la pochette matelassée et bien coller.
- Fixer la feuille de route sur l'enveloppe PuroPak™.

PROTÉGER CONTRE LE GEL

INSTRUCTIONS D'EXPÉDITION

- Toujours faire appel au service de messagerie PuroLator™ pour l'envoi de spécimens au laboratoire.

**NUMÉRO SANS FRAIS DE PUROLATOR™
888.744.7123**

SOLUTION DE CONSERVATION OraSure™^{MD}

La solution que contient ce flacon comprend des ingrédients de conservation, tous non toxiques pour les adultes et les enfants.