

Buccal Swab Collection Instructions

Kit Components



Swabs



Sample Envelope



Shipping Envelope




Shipping waybill

STEP 1: PREPARATION


IMPORTANT: Do NOT eat, drink, clean your teeth or use mouthwash 1 hour before sample collection.

Do NOT chew or bite the swabs.


STEP 2: COLLECTION INSTRUCTIONS

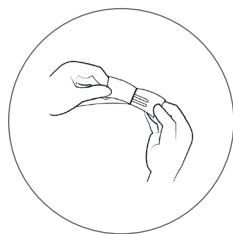

1. Partially peel open the paper sleeve and remove the two swabs from the sleeve, taking care **not to touch** the swab heads with your fingers.

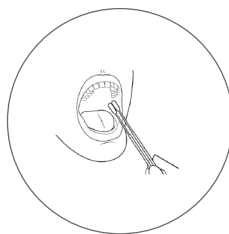

2. Insert the two swabs together into your mouth and firmly rub up and down against the inside of your cheeks 10 times. **IMPORTANT: Use reasonable, firm, and solid pressure.**

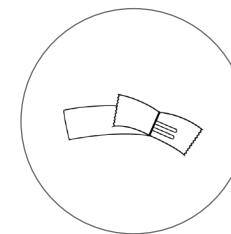

3. Carefully place the two swabs back into the paper sleeve. **Do not touch the swab heads with your fingers.**

STEP 3: SHIPPING INSTRUCTIONS



1. Place the sleeve into the sample envelope provided and seal the envelope.



2. Write your name, date of birth and the date of collection at the bottom left side of the sample envelope.



3. Place the sealed sample envelope into the shipping envelope with the completed requisition and payment form (if applicable). Affix the shipping waybill to the back of the envelope. Bring the package to the courier location or arrange for a pickup by phone. Ship for next day delivery.

Instructions pour le prélèvement par écouvillon buccal

Composantes de la trousse :



Écouvillons



Enveloppe de prélèvement



Enveloppe d'expédition



Bordereau d'expédition


ÉTAPE 1 : PRÉPARATION

IMPORTANT: NE PAS boire, manger, se brosser les dents ou utiliser un rince-bouche durant 1 heure avant le prélèvement de l'échantillon.
NE PAS mâcher ni mordre les écouvillons.


ÉTAPE 2 : INSTRUCTIONS DE PRÉLÈVEMENT



1. Ouvrir partiellement l'emballage de papier et retirer les deux écouvillons en prenant soin de **ne pas toucher** les têtes des écouvillons avec vos doigts.

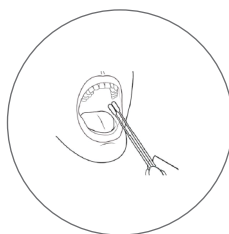

2. Insérer les deux écouvillons en même temps dans votre bouche et frotter fermement contre l'intérieur de votre joue 10 fois. **Important : utiliser une pression raisonnable, ferme et solide.**

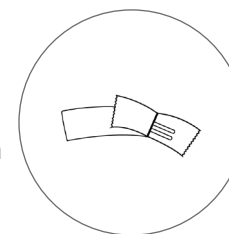

3. Placer délicatement les deux écouvillons dans l'emballage de papier. **Ne pas toucher les têtes des écouvillons avec vos doigts.**

ÉTAPE 3 : INSTRUCTIONS D'EXPÉDITION



1. Placer l'emballage dans l'enveloppe de prélèvement fournie et sceller l'enveloppe.



2. Inscrire votre nom, votre date de naissance et la date de prélèvement en bas à gauche de l'enveloppe de prélèvement.



3. Placer l'enveloppe de prélèvement scellée dans l'enveloppe d'expédition avec la requête médicale et le formulaire de paiement (le cas échéant) complétés. Fixer le bordereau d'expédition à l'arrière de l'enveloppe. Apporter le colis au point d'expédition du transporteur ou organiser une cueillette par téléphone. Expédier pour livraison le lendemain.